


Mischbettharzpatrone austauschen Cliniclave 45

1. Schalten Sie den Autoklav aus und schliessen Sie den Absperrhahn des Drucktanks.



2. Drehen Sie den Wasserhahn vom Kaltwasserzulauf zu.
3. Drehen Sie den Behälterschlüssel im Uhrzeigersinn, um den dritten Patronenbehälter (rechts) zu öffnen.

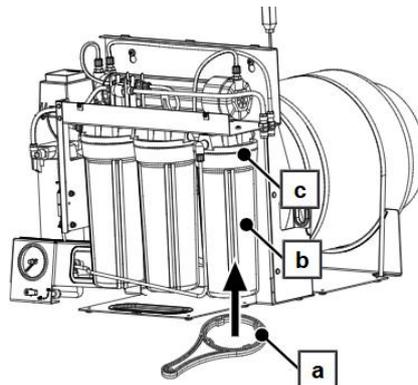

4. Drehen Sie den Behälterschlüssel im Uhrzeigersinn, um den Patronenbehälter zu öffnen.
5. Entfernen Sie den Behälterschlüssel sobald sich den Patronenbehälter leicht drehen lässt.
6. Drehen Sie den Patronenbehälter mit der Hand von dem Gehäuse (Pos. c) der Wasser-Aufbereitungsanlage.
7. Patrone austauschen und schrauben Sie den Patronenbehälter (Pos. b) von Hand in das Gehäuse (Pos. c) der Wasser-Aufbereitungsanlage.
8. Führen Sie den Behälterschlüssel (Pos. a) von unten nach oben über den Patronenbehälter.
9. Drehen Sie den Behälterschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um den Patronenbehälter festzuziehen.
10. Entfernen Sie den Behälterschlüssel und verwahren Sie ihn sicher.
11. Öffnen Sie den Absperrhahn des Drucktanks und drehen Sie den Wasserhahn vom Kaltwasser wieder auf.
12. Schalten Sie den Autoklav wieder ein, der Leitwert wird automatisch nach jeder Sterilisation tiefer.