


Remplacer la cartouche Cliniclave 45

1. Éteignez l'autoclave et fermez la vanne d'arrêt du réservoir sous pression.



2. Fermez le robinet d'eau froide.
3. Tournez la clé du conteneur dans le sens horaire ouvrir le troisième conteneur de cartouches (à droite).

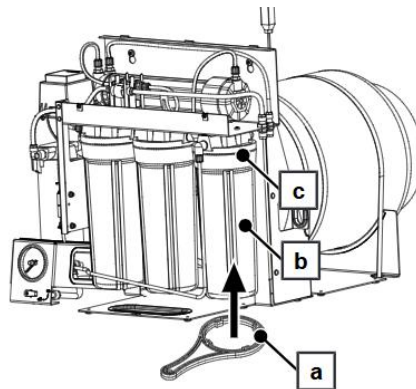

4. Tournez la clé du conteneur dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le conteneur de cartouches.
5. Retirez la clé du conteneur une fois que le conteneur de cartouche peut être tourné facilement.
6. Dévissez à la main le récipient à cartouche du boîtier (pos. c) du système de traitement de l'eau.
7. Remettez la cartouche en place et vissez le récipient de la cartouche (pos. b) à la main dans le boîtier (pos. c) du système de traitement de l'eau.
8. Guidez la clé du conteneur (pos. a) de bas en haut sur le conteneur de cartouches.
9. Tournez la clé du conteneur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer le conteneur de cartouche.
10. Retirez la clé du conteneur et rangez-la en toute sécurité.
11. Ouvrez le robinet d'arrêt du réservoir sous pression et remettez le robinet d'eau froide.
12. Remettez l'autoclave en marche, la conductivité diminuera automatiquement après chaque stérilisation.